

## Tabela de Memória: T23

**A** Programa: **(A) 2,28** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda contínua, 2,28 Hz com largura de pulso de 550 µs.  
Pulso não polarizado.



**B** Programa: **(B) 4,56** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda contínua, 4,56 Hz com largura de pulso de 500 µs.  
Pulso não polarizado.



**C** Programa: **(C) 9,12** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda contínua, 9,12 Hz com largura de pulso de 450 µs.  
Pulso não polarizado.



**D** Programa: **(D) 18,25** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda Contínua, 18,25 Hz com largura de pulso de 400 µs.  
Pulso não polarizado.



**E** Programa: **(E) 36,5** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda Contínua, 36,5 Hz com largura de pulso de 350 µs.  
Pulso não polarizado.



**F** Programa: **(F) 73** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda Contínua, 73Hz com largura de pulso de 300 µs.  
Pulso não polarizado.



**G** Programa: **(G) 146** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda Contínua, 146Hz com largura de pulso de 280 µs.  
Pulso não polarizado.



**H** Programa: **(L) 276** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda Contínua, 276Hz com largura de pulso de 250 µs.  
Pulso não polarizado.



**I** Programa: **(D) + (L)** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda mista, com as frequências D e L em sequência, larguras de pulso conforme cada frequência acima e tempo de 4 segundos de permanência em cada frequência. Pulso não polarizado.



**J** Programa: **(A) + (B) + (F)** Tempo Total: 15min  
Descrição: Onda mista, com as frequências A,B e F em sequência, larguras de pulso conforme cada frequência acima e tempo de 5 segundos de permanência em cada frequência. Pulso não polarizado.



\* Os nomes dos Programas desta Tabela de Memória foram correlacionados para facilitar o uso pelo profissional. Para o correto uso do EL30, verifique na Descrição do Programa se a forma de onda selecionada é a correta para o seu uso pretendido.

## Programação: AURICULOTERAPIA CLÍNICA

Revisão 01 - Abr/24

O EL 30, na função eletroestimulador, possui 10 programas fixos de estimulação alojados em sua memória que podem ser facilmente selecionados pelo usuário.

Os programas de memória podem variar de um EL 30 para outro, por isso o usuário deve consultar a «**Tabela de Memória**» que acompanha o seu EL 30.

A "**Tabela de Memória**" chamada de AURICULOTERAPIA CLÍNICA visa atender aos cursos ministrados pela Profa. Larissa Bachir. Os programas, conforme expertise da autora, oferecem uma abordagem para tratamento por Eletroterapia utilizado em Auriculoterapia Clínica, a Auriculoterapia Francesa fundamentada na visão do Dr. Raphaël Nogier.

A forma de utilização do equipamento, posicionamento de eletrodos, tempo de aplicação e outros assuntos específicos são abordados e explicados em vídeos ou cursos oferecidos pela autora. Para maiores informações entrar em contato através do site:

[www.escolanogier.com.br](http://www.escolanogier.com.br)

### Programas:

**(A) 2,28** - Frequência que estimula o trabalho celular, sem estimular a divisão celular. Utilizada em patologias ligadas ao sofrimento celular (ex: traumas, edema, hematoma, anoxia, hipóxia, infarto, queimaduras, etc).

**(B) 4,56** - Frequência que estimula as funções de um tecido composto por várias células, ou seja, é uma frequência que lida com as trocas inter-celulares (ex: alterações vasculares, arterites, doenças auto-imunes, alergias, disfunções do sistema digestivo).

**(C) 9,12** - Frequência que estimula as funções motoras e de excreção. Deve ser escolhida quando for tratar de situações como : trismus, espasmo intestinal, atonia vesical ou vesicular, constipação, diarreia, hipotensão, etc.

**(D) 18,25** - Frequência que lida com as desordens da locomoção e deslocamento. Uso comum também em desordens da coordenação do movimento. (ex: desordens na motricidade binocular, disfunção da marcha, desordens posturais).

**(E) 36,5** - Frequência que estimula as funções associadas às funções medulares, como dores crônicas, e algodistrofia.

**(F) 73** - Frequência que estimula funções do córtex sub-cortical, ela pode ser utilizadas em várias abordagens como bulimia, anorexia, desordens menstruais, pseudoartrose, úlcera varicosa, desordens emocionais, alterações hormonais, etc.

**(G) 146** - Frequência que estimula as funções corticais, usada em tratamentos de várias patologias, como: zumbido, histeria, disfunções psicossomáticas, desordens cognitivas.

**(L) 276** - Frequência utilizada para alterações da Lateralidade Cerebral, associado à problemas como: dislexia, discalculia, disortografia, desordens do aprendizado, dificuldade de concentração, depressão nervosa.

**(D) + (L)** - Programa ideal para uso no Ponto O'.

**(A) + (B) + (F)** - Programa ideal para uso em pontos cicatriciais.

### **Sobre a Escola Raphaël Nogier de Auriculoterapia Clínica:**

Apresentamos a Formação Original da Metodologia de Tratamento da Auriculoterapia Francesa, desenvolvida pelo seu criador, o Dr. Paul Nogier.,

Este curso é o único na língua portuguesa autorizado pela principal autoridade mundial em Auriculoterapia e o único conselheiro da OMS sobre o assunto, o Dr. Raphaël Nogier.

Além disso, somos a única escola que oferece a formação completa em Auriculoterapia em caráter de pós-graduação lato sensu.

A formação abrange todos os aspectos fundamentais e obrigatórios da Auriculoterapia Francesa, ou seja, os 3 Pilares desta metodologia preconizados pela Dra Larissa Bachir:

- ÿ 1) detecção de pontos,
- ÿ 2) sinal vascular e
- ÿ 3) frequências de Nogier

Profissionais graduados na área da saúde (ou seja, com formação universitária na saúde) são muito bem-vindos, pois a base da Auriculoterapia está nas ciências médicas, como anatomia, fisiologia, neurofisiologia e etiopatologia humana, fundamentais para compreender o curso em sua totalidade.

No Brasil e demais países da língua portuguesa, esse é o único curso autorizado pelo Dr. Raphaël Nogier e ministrado por sua única representante na língua portuguesa, a Dra. Larissa Bachir. Conheça a Verdadeira Auriculoterapia e tenha resultados em 100% dos pacientes já na primeira sessão.